


MYTREX

EyeLax Warm

マイトレックス アイラックス ウォーム

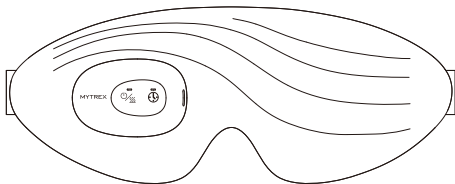

取扱説明書

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

お読みになった後も必要に応じて確認できるよう、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。万一、異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。



禁止

次の方は使用しない。

事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合失明の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
- 骨折、整形手術などで顔面に埋め込み手術を受けた方

警告



禁止

次の方は使用しない。

事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合失明の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 妊娠中の方やお年寄りなど熱さを自覚できない方
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
- 目の病気のある方、またはあった方
- 目の手術を行った方（レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください）

下記の場合は使用しない。

肌や身体のトラブルの原因になります。

- 体調のすぐれないときや発熱している場合
- 肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
- 皮膚に異常のある場合

警告



禁止

高温になる場所（火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など）で充電、使用、保管をしない。加熱したり、火中に投下しない。

発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。

乳幼児には使わせない。また、乳幼児の手の届くところに保管しない。ペットには使用しない。

事故やけがの原因になります。

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

事故やけが、故障の原因になります。

分解や修理、改造をしない。

発火したり、故障や事故の原因になります。

本製品を装着中は、歩き回ったり、他の作業をしない。

思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告



禁止

浴室や湿気の多い場所で使用したり、保管しない。
また、水のかかりやすい所に置かない。

感電や火災の原因になります。

ヒーターシート(操作部)や付属品を水につけたり、水洗いしない。

感電やショートによる火災などの原因になります。

ヒーターシート(操作部)を取り外して、アイマスクのみ洗濯ができます。

本体および付属品に次のような異常があった場合は、直ちに本体の電源を切り、使用を中止する。充電中の場合は、コンセントからACアダプター等をすぐに抜く。

- 煙が出たり、異常に熱い場合
- 異常なおいや音がする場合
- 内部に異物が入った場合 ●本体が破損した場合

警告



禁止

USBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。

感電、ショート、発火、故障の原因になります。

USBコードや本体の差込口、すきま、通気孔などにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。

感電やショート、発火の原因になります。

注意



禁止

ヒーターシート（操作部）をたたく、重いものを載せる、踏みつける、落下させるなどの衝撃や力をあたえない。

けがや本体が故障する原因となります。

注意



禁止

USBコードを抜くときは、先端部分を持ち、コードを引っ張らない。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電やショート、発火の原因になります。

USBコードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

収納時にUSBコードを本体などに巻き付けない。

コードに負荷がかかると断線し、ショートによる火災などの原因になります。

USBコードは付属品を使用する。

故障の原因になります。なお、付属品は他の商品には使用しないでください。

注意



禁止

充電中に雷が鳴り始めたらACアダプター等をコンセントから抜く。

落雷による火災や感電の原因になります。



必ず守る

使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。

火災・故障の原因になります。

はじめて使用する場合は短時間・低温(LEDランプ:緑色)から使用する。


体調不良の原因になります。

連続使用時間は30分を超えないようにする。使用中に熱く感じた場合は、すぐに位置をずらして調整するもしくは使用を中止し、しばらく時間をおいて再度使用する。

体調不良や低温やけど、肌トラブルの原因になります。

各部の名称

本体：表

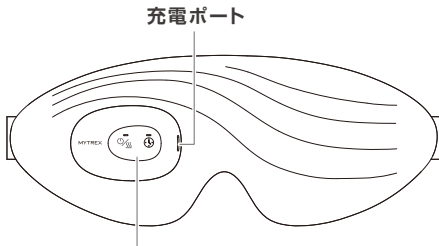

操作部

※本体裏のヒーターシートと一体型となっており、
本体から取り外し可能です。



本体：裏

ベルト

(長さ調整可)

ヒーターシート

※本体表の操作部と一体型です。

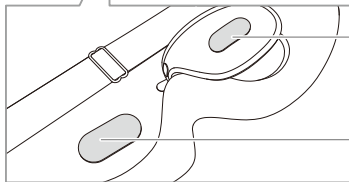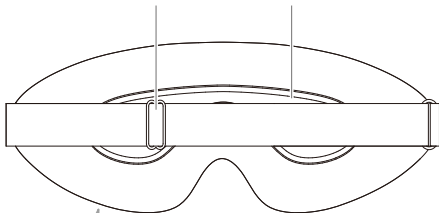

面ファスナー
(ヒーターシート側)

面ファスナー
(本体側)


操作部

●ヒーターレベルランプ

LED色	設定
緑色	低温
青色	中温
赤色	高温

●タイマー設定ランプ

LED色	設定
緑色	8分
青色	14分
赤色	20分

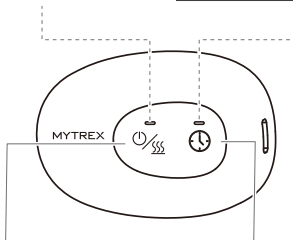

電源/ヒーターレベル調整ボタン

- ・長押し：電源をオン／オフします。
- ・短押し：押すたびに、ヒーターレベルを切り替えます。

タイマー設定ボタン

押すたびに、タイマー設定時間を切り替えます。

ご使用前に（充電方法）

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

電池残量低下時	ヒーターレベルランプが 赤色に点滅
充電動作時間の目安	充電時間：約2時間 動作時間*：約3時間

*動作時間は「ヒーター低温」で使用した場合の目安であり、「ヒーター高温」では約2時間使用できます（室温25℃時）。充電時間や動作時間は、電池の残量や充電環境、使用環境によって大きく前後します。室温が低くなると（10℃以下）、動作時間が短くなる傾向があります。

※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。

※電池の残量、充電環境および使用環境によって、充電時間や動作時間は大きく前後します。

※初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。

1 操作部側面の充電ポートに、付属の充電用USBコードのType-Cコネクター側を接続する。


2 USBコードのType-Aコネクター側をお手持ちのACアダプター等のUSBポートに接続する。

●ヒーターレベルランプが赤色に点滅し充電を開始します。

※電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、市販のACアダプター等のUSBポートをお使いください。ACアダプターは1Aを超えるものは使用しないでください。急速充電器は故障の原因になるおそれがあるため、使用しないでください。

※一部のパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターでは充電ができない場合があります。電源供給元を変更し、再度充電してください。

※充電中は、本体の電源をオンにすることはできません。

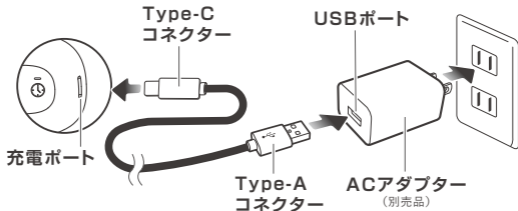


- 3** ヒーターレベルランプが赤色に点灯したら、USBコードを取りはずす。

ご使用方法




注意

- ・ヒーター機能をオンにしたまま眠らないでください。
- ・開封時に変形していたり、しわができていますが、約1日で元の状態に戻ります。

- 1** 電源/ヒーターレベル調整ボタン()を長押しして電源をオンにする。

- 前回使用時の設定で、ヒーターレベルランプとタイマー設定ランプが点灯します。

- 2** ヒーターレベルを調整するには、電源/ヒーターレベル調整ボタン()を短く押す。

※ヒーターレベルは3段階から選択できます。押すたびに「低温→中温→高温→低温→中温…」の順に切り替わります。


※使い始めは低温で使用し、慣れてからレベルを調節してください。

3 タイマーを設定するには、タイマー設定ボタン (🕒) を短く押す。

※タイマーは3段階から選択できます。押すたびに「8分→14分→20分→8分→14分…」の順に切り替わります。

4 サイズを調整する。

※以下の図のようにアジャスター (A) を動かしてサイズを調整してください。

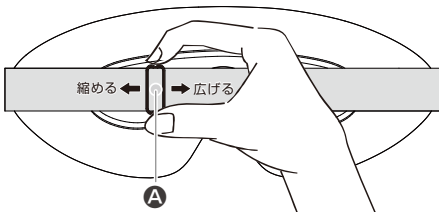

5 本体を装着する。

※途中で電源を切る場合は、(🔌/🔌) ボタンを長押ししてください。

お手入れ方法



注意


- ・ヒーターシート(操作部)は洗濯不可です。水につけたり、水洗いしないでください。
- ・操作部はヒーターシートと一体型です。操作部だけをヒーターシートから外すことはできませんのでご注意ください。

ヒーターシート(操作部)の取り外しかた

お手入れの際は、まず下記の手順でヒーターシート(操作部)をアイマスク本体から取り外してください。

- 1 アイマスク本体内側の面ファスナーを外す。

- 2 アイマスク本体からヒーターシート(操作部)を取り外す。

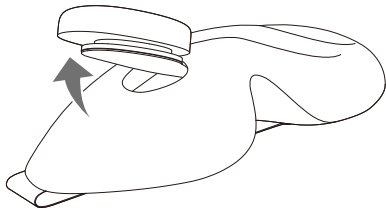


アイマスク本体

ヒーターシート(操作部)



ヒーターシート（操作部）の取り付けかた

- 1** ヒーターシート（操作部）の凹部（**A**）にアイマスク本体の凸部（**A**）が入るように取り付ける。

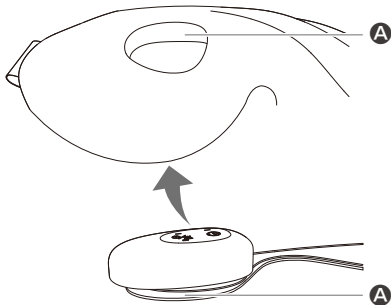

- 2** アイマスク本体の内側の面ファスナーで固定する。

お手入れ方法

- ヒーターシート(操作部)を取り外して、アイマスク本体のみ洗濯が可能です。以下の洗濯表示にしたがって洗濯してください。



- ヒーターシート(操作部)および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 本体が完全に乾いてから、ヒーターシート(操作部)を取り付けてください。

お取り扱いの注意

- 洗濯の際は、他の衣類と分け、ネットに入れて洗濯してください。
- 漂白剤、蛍光増白剤の含まれていない中性洗剤をご使用ください。
- 色移りや変色の原因となりますので、長時間濡れたまま放置しないでください。
- 洗濯後は竿などに掛け、形を整えた状態で陰干してください。
- タンブラー乾燥は避けてください。
- 色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
- 毛玉が発生する場合がありますので、お取り扱いにご注意ください。

保管方法

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、USBコードを本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 素材の特性上、時間の経過とともに本体の素材が変色することがありますが、品質や性能において問題はありません。

充電電池について

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。（電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。）
- 電池交換には対応していません。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。



Li-ion

本製品（本体）はリチウムイオン電池を内蔵しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

リチウムイオン電池内蔵製品の注意点は下記でご確認いただけます。

<https://mytrex.jp/support/safety/battery/>

製品仕様

ブランド	MYTREX (マイトレックス)
品名	EyeLax Warm (アイラックス ウォーム)
型番	MT-ELW-25B
サイズ	約100×260×45mm
質量	約78g
定格電源	5V  1A
定格消費電力	3.4W
バッテリー	リチウムイオン電池3.7V  1000mAh
電源供給元	ACアダプター／PC等のUSBポート
対応ACアダプター	5V/1A

使 用 環 境	温度：5℃～40℃、相対湿度：≦80%RH
素 材	表 裏 素 材：ナイロン85%、ポリウレタン15% クッション材：ポリウレタンフォーム100% ベ ル ト：ナイロン75%、ポリウレタン25% ヒーターシー：シリコン、ナイロン、ポリウレタン ト（操作部）
セ ッ ト 内 容	本体1個 ヒーターシート*1個 充電用USBコード1本 取扱説明書1部

*ヒーターシートは出荷時には本体に取り付け済みです。

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがあります。

※本製品は医療機器ではありません。

MYTREX カスタマーサポート

製品についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

[WEBでのお問い合わせ]

24時間受付

<https://mytrex.jp/support/>



[電話でのお問い合わせ] 092-260-7366

電話受付時間9:00～17:30(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

発売元：株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

Designed in Japan. Made in China.

©2025 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

202500KB